

かんたんガイド

上手にさく乳するためのコツ



正しい姿勢で正しく持ちましょう。




正しい方法で洗浄、消毒しましょう。

ご使用前のチェック

各パーツはきちんと洗浄されているか

白い薄膜の向きは正しいか

さく乳口に対して右か左に
向けてください。

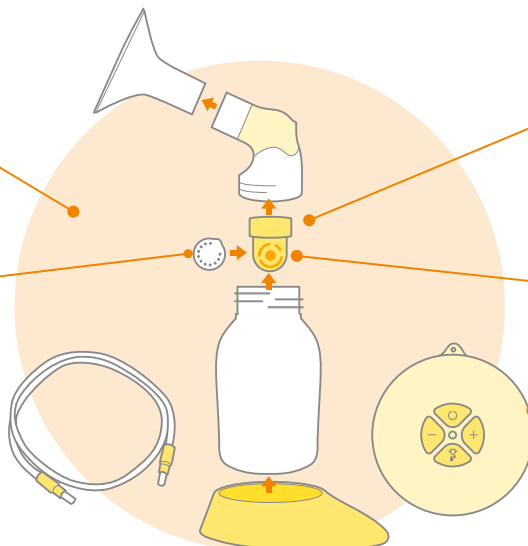

さく乳弁と膜



さく乳弁にキズがないか

電池の向きは正しいか

※電池を使用している場合

洗浄・消毒方法

● ポンプセットは全て外してください。



● 使用後は毎回洗剤で洗ってください。



● 1日1回水から煮沸消毒してください。



劣化の原因になるので薬液は使わないでください。

